

## Innova Alkopro-A1 användarmanual

### Introduktion

Tack för att du har köpt Innova Alkopro-A1.

Innova Alkopro-A1 är världens mest avancerade handhållna alkoholmätare.

Den använder elektrokemisk bränslecell sensorteknologi för att försäkra pålitlig och exakt information likaså som bekväm användning.

### Diagram och Förklaring:



### Användar Instruktioner:

1. Sätt i munstycket i alkometaren. Munstycket kan sättas i från båda hållen av alkometaren.
2. Tryck och håll ner On/Off-knappen i 2-3 sekunder för att starta alkometaren.
3. När alkometaren visar "BLOW" på displayen så ska den som testas ta ett djupt andetag och blåsa i munstycket tills det hörs ett piip.  
Notering: Ett manuellt test kan göras genom att trycka på Funktion-knappen medens den som testas blåser.
4. Alkometaren visar "WAIT" på displayen medens informationen behandlas.  
När den är klar så ger alkometaren ifrån sig upprepade piip-toner.
5. Ett återtest kan utföras genom att trycka på Funktion-knappen en gång.  
Notering: För så bra resultat som möjligt så ska man vänta 3 minuter innan man utför nästa test om det tidigare testet ger en alcohol-halt på högre än noll.
6. Tryck och håll ner On/Off -knappen i 2-3 sekunder för att stänga av alkometaren.
7. För att visa det tidigare test-resultatet, tryck och håll ned både Funktion-knappen och On/Off -knappen samtidigt.

## Mätningar och förutsättningar för test

- Använd ett nytt munstycke för varje testperson.
- Det måste vara ett mellanrum på minst 15minuter efter det att alkohol har intagits i munnen. Rester av alkohol i munnen kan ge felaktiga mätningar. Sådana rester kan komma från väldoftande/arom-fyllda drycker, munvatten, mediciner och droppar, och även av uppstötningar eller kräkningar. Att skölja munnen med vatten eller andra icke-alkoholhaltiga drycker gör inte att du inte behöver vänta 15 minuter innan test efter det att alkohol har intagits i munnen.
- Temperaturen som Alkomätaren används i bör vara mellan 10°C till 40°C.
- Alkomätaren bör förvaras i en temperatur mellan -15°C till 65°C.

## Ansvar för korrekt funktion eller skada

Ansvar för korrekt funktionalitet av instrumentet är oåterkalleligt överfört till ägaren eller användaren ifall service eller reparation utförs av personal som inte är anställda eller som har tillåtelse att göra detta av Innovaxse AB. Innovaxse AB kan inte hållas ansvarig för skada som blivit på grund av att rekommendationerna ovan inte har följts.

## Effekter av alkohol i människokroppen

Alkohol är lugnande för det centrala nerv-systemet. Detta innebär att det gör att processerna som försiggår i de högre centrena i hjärnan går långsammare vilket resulterar i klassiska symptom som försämrad balans, dålig koordination av ögon och lemmar, tunnelseende och oförmåga att vara självkritisk vilket resulterar i att en berusad förare verkligen tror sig köra bättre och säkrare än han eller hon egentligen gör.

## Certifieringar och Godkännande

